

● ● ● ● 卓上高圧蒸気滅菌器

MY-250A

Nタイプオートクレーブ



Made in JAPAN

- 滅菌の前工程を重視し効率良い脱気を追求した滅菌プログラムを搭載しています。
- ワンタッチ操作で滅菌から乾燥までの自動運転が可能です。
精製水給水後、「121℃」または「134℃」ボタンを押すだけで滅菌可能です。
- 患者さんが安心できる良質な蒸気によるクリーン滅菌方式です。
※滅菌で使用した精製水を再利用しません。
- バクテリアフィルターによるクリーン送風乾燥付です。



Program

	滅菌工程	乾燥工程
121°C滅菌	20 min	30 min
134°C滅菌	4 min	30 min

Specifications

MY-250A 仕様

内 容	仕 様
販売名・型式	卓上高圧蒸気滅菌器 MY-250A
一般的名称	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
機器の分類	管理医療機器(クラスⅡ)／特定保守管理医療機器
認証番号	第228AKBZX00021000号
滅菌方法	重力置換方式
外形寸法	W480×D512×H390
缶内寸法	φ250×350(有効310)
電源電圧	単相AC100V 50/60Hz
消費電流	12A
滅菌温度	121°C／134°C
給水方式	手動
乾燥方式	クリーン送風乾燥方式
重 量	37kg
付 属 品	給水カップ、排水ホース(ドレインサプレッサー付)、ホースバンド1個、ホース継手、設置工事説明書、取扱説明書、添付文書
オプション品	アルミトレイ、トレイホルダー、棚枠 アミカゴ、卓上型純水器(精製水作成用)
コ ン セ ント	15A以上の容量の漏電遮断器を有するアース付コンセントに単独で使用下さい。 JIS C 8303 二極接地極付差込接続器



関連製品

MB-250 クラスBオートクレーブ

販売名：卓上高圧蒸気滅菌器 MB-250
 一般的名称：小型包装品高圧蒸気滅菌器
 機器の分類：管理医療機器(クラスⅡ)／特定保守管理医療機器
 医療機器認証番号：第225AKBZX00091000号
 製造販売：チヨダエレクトリック株式会社



※仕様・カタログ等の掲載内容は製品改良のため予告無く変更する場合があります。



製造販売

チヨダエレクトリック株式会社



本社：〒387-0018 長野県千曲市大字新田124
 TEL：026-273-1800 FAX：026-272-5723
 ●お問合せ：営業部 TEL：026-214-1802
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売店

